

## OXYCALF

Skābekļa balons jaundzimušajiem teļiem.  
Satur skābekli ar 99,4 % tīrību.

### Kad lieto OxyCalf?

- pēc smagām dzemdībām
- ilgstoša atnešanās
- ķeizargrieziens

### Kāpēc lieto OxyCalf?

- skābeklis stiprina asinsrites sistēmas un asinsspiediena funkcionēšanu
- stimulē organisma atskābināšanas procesu, ko izraisījusi dzemdību piepūle
- palielina enerģijas izmantošanu muskuļos, nomierina muskuļu trīci, kas rodas pēc dzemdībām
- aktivizē organisma vitalitāti
- samazina stresa izraisīto vielu līmeni

### Kā lietot OxyCalf?

Instrukcija:

	1	noņemt vāciņu
	2	pievienot šļūteni
	3	aplīkt šļūtenes cilpu ap teļa kaklu
	4	ievietot šļūtenes galu teļam nāsī un ieslēgt skābekļa plūsmas padevi

### Specifikācija:

Izmēri: 665 x 350 mm

Svars: 175 g

Saspiestā skābekļa tilpums: 12 l

Balona tilpums: 930 ml

Piesātinājums ar skābekli: 99,4 %

Skābekļa izdalīšanās laiks no balona: 3-4 minūtes



**Ražotājs:** VET Planet Sp.,zoo, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki, Polija, reģ. Nr. PL 1417435p.